

開発中

折り畳んで、持ち運べる検体採取ボックス

持ち運べて何処にでも設置可能



医師及び看護師がボックスの中に入り、正面の透明アクリル板とゴム手袋を使用してボックス外にいる患者より検体を採取する。ボックスの中は防護服等の必要はない。使用時のみ組み立てるが、普段はたたんで保管できます。

仕様

寸法：W0.9m×D0.9m×H2.0m

重量：約20kg

材質：プラスチック段ボール

折り畳めて収納スペース少ない



お取り扱いについての注意事項

1. 本製品はプラスチックダンボールでできており、軽量化されていますので転倒防止の為、両サイドのサイドステーに重しを置いてご使用ください。
2. 強風時には、使用しないで下さい。
3. 火気の近くでは使用しないでください。
4. 設置場所ではできるだけ平らな場所に設置してください。
5. 夏季の高温時に鉄板やアスファルトの上に設置しますと変形する恐れがありますのでご注意ください。
6. 室内では暖房器具等の熱源を持ち込まないで下さい。喫煙はやめてください。
7. 屋根の上には物を載せないで下さい。
8. 折り畳み収納時に物を置かないで下さい。足を掛けたり、踏みつけたりしないで下さい。
9. マジックテープは剥がれることがありますので、その時は貼り直してください。



JFE アクアサービス機器 株式会社

〒436-0038 静岡県掛川市領家1450番地

TEL：0537-24-5531 FAX：0537-24-5518